

OPERATIONEN, DEM LEGHOLDERRX® EINFACHER DURCHGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN



Der LegholderRX® erlaubt die intraoperative stabile Lagerung des Kniegelenks in **sechs verschiedenen Beugestellungen**. Mit den Velcrogurten kann der LegholderRX® einfach direkt am Operationstisch unter der sterilen Abdeckung befestigt werden.

Als Positionierungshilfe ist der Legholder kombiniert mit einer Seitenstütze am Oberschenkel sehr hilfreich bei **offenen Knieoperationen wie Arthroplastiken, Osteotomien, Knorpelrekonstruktionen und der Patellachirurgie**.

Die Modelle sind nicht kaputt zu kriegen ... Mir persönlich gefällt die extra stabile Version sehr gut. Sie bietet zusätzliche Stabilität, vor allem für grössere und schwerere Patienten.

Prof.Dr.med.Niklaus Friederich, Universitätsspital Basel



NEUE VERBESSERTE VELCROGURTE

Die Velcrogurte haben einen praktischen Verriegelungsstab sowie eine integrierte Zeichnung in der Zuglasche zur richtigen Anwendung.



VERFÜGBAR IN ZWEI LÄNGEN

KURZE VELCROGURTE

Der kurze Velcrogurt wird idealerweise verwendet, wenn der Legholder nur über die Beinauflage der Operationsseite befestigt werden kann. Dies ermöglicht die unabhängige Bewegung der Beinauflage der Operationsseite.



LANGE VELCROGURTE

Der lange Velcrogurt kann sowohl für die Befestigung über die halbe Beinauflage der Operationsseite als auch über die ganze Beinauflage verwendet werden.



TECHNISCHEN DATEN LEGHOLDER



Dimensionen

490 x 240 x 200mm

Gewicht

3 kg, einschliesslich


zwei robuste
Velcrogurte (lange
oder kurze Version).

Spezifikationen

Pflegeleichte,
robuste, nicht
allergene
Kunststoffteile,
röntgendurchlässig.

Reinigung

Muss nicht

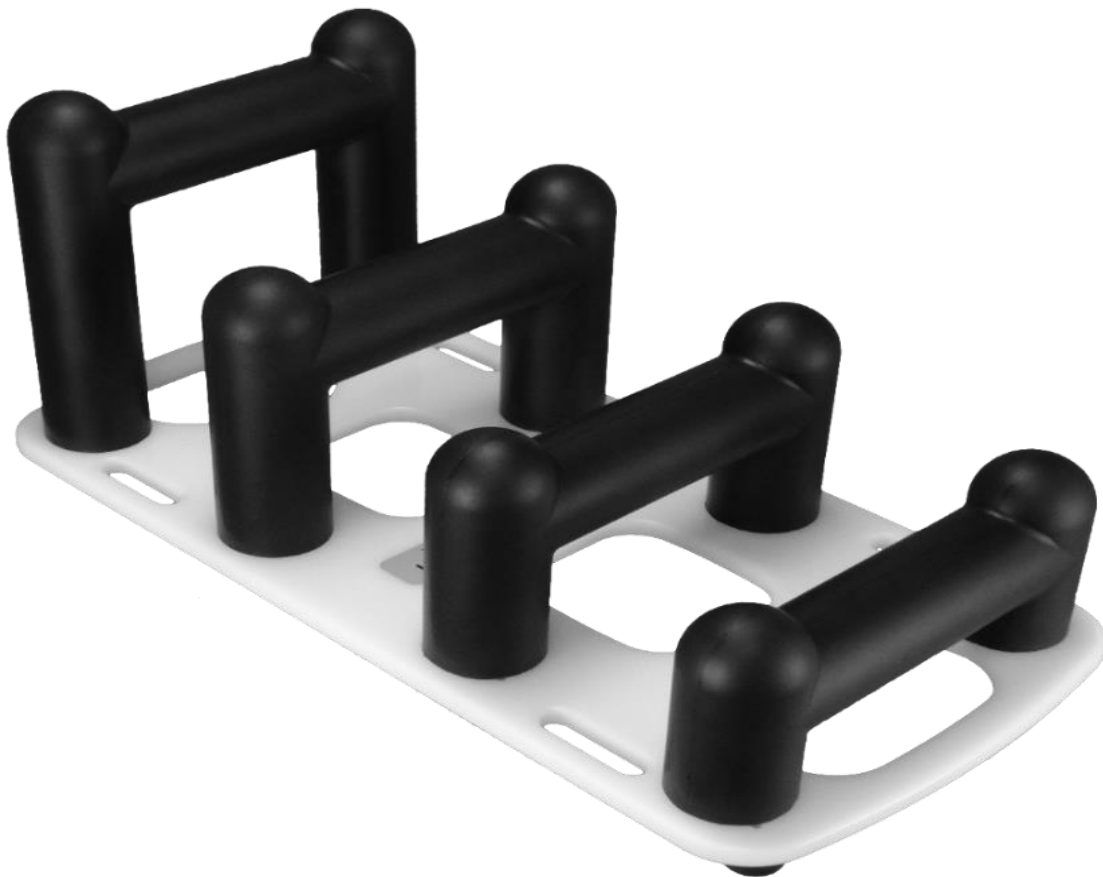

SWISS MADE  SINCE 2000

LegholderRX® mod. dép.
CE (Swissmedic CH-201505-0035) FDA
registriert
GLN: 7649994277000

endocon GmbH



MEDIZINTECHNIK

in der Au 5 | D-69257 Wiesenbach (bei Heidelberg)



Tel: +49 6223 7390 10

Fax: +49 6223 7390 199



info@endocon.de | www.endocon.de